

Règles d'étiquetage des échantillons

A l'attention des préleveurs externes :

Si vous disposez d'étiquettes pré-imprimées, il est impératif de la positionner selon les mêmes modalités, pour ce, veillez à apposer (**droite et à plat**) l'étiquette pré-imprimée sur la zone papier du tube.



Etiquette
Superposée
Sur l'étiquette du tube

Correct



Etiquette
mal collée

Niveau du sang
non visible


Incorrect

En interne:

L'étiquette CAB est positionnée à la même hauteur que celle du tube primaire.

Dans tous les cas de figures : **il est impératif** que l'étiquette soit positionnée **droite, à plat** (sans plis) et soit **parfaitement lisible**.

Son positionnement permettra la visibilité du sérum sur une zone d'au moins 4 mm.

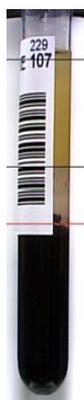

Correct



CAB
mal collé



Sérum
non visible

Incorrect

Cas de hémocultures :



La zone 1 est dédiée au collage de l'étiquette patient, elle est agrandie et clairement identifiée pour faciliter les pratiques d'étiquetage.

Les zones 2/3/4/5, qui apparaissent sur l'étiquette, permettent aux automates d'identifier les flacons et d'en vérifier la conformité, il est donc **portant de ne rien mentionner de façon manuscrite sur ces zones là**.

Il est **primordial** de bien positionner les étiquettes sur les flacons dans la zone dédiée, de ne pas masquer **la fenêtre lecture** du volume.

Fenêtre de lecture



Flacon aérobie



Flacon anaérobie



Flacon pédiatrique
(aérobie)

Tout manquement à ces règles d'étiquetage sera enregistré en non-conformité.